

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 192**

620061 Екатеринбург, ул. Сельская, д. 16. Тел: (343) 252-13-78

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детский сад № 192
Л.А. Сидорова

Приказ № 24/1 « 27 » 06 2022 г

Инструкция по эксплуатации 2-х секционного телескопического пандуса

Двух секционный телескопический пандус (Мега 2 ПТ1-210) используется для спуска/подъема инвалидных колясок на 1 этаже здания детского сада. Предназначен для установки на марше лестницы 1 этажа, где установка стационарного пандуса мешает проходу пешеходов.

Пандус устанавливается ответственным лицом при прибытии (убытии) инвалида, маломобильного гражданина в (из) детского сада.

Для установки пандуса необходимо:

1. Взять упаковку с пандусом на шкафу в коридоре на 1 этаже (у прачечной);
2. Извлечь пандус из упаковки;
3. Взять один полз пандуса вертикально так чтобы фиксирующая кнопка была под пальцами правой руки;
4. Нажатием пальца на кнопку удлинить пандус до щелчка (кнопка в данном случае зафиксирует длину пандуса на другом его конце);
5. То же самое проделать со вторым полз пандуса;
6. Определить верхнюю и нижнюю части ползьев (концы ползьев имеют изгибы: верхняя часть - внутрь, нижняя - наружу);
7. Каждый полз пандуса уложить на ступени лестничного марша 1 этажа, соответственно концами изогнутыми внутрь наверх, наружу - вниз (ширина между ползьями на более 50 см), проверить устойчивость ползьев (перед этим при необходимости, освободив проход от напольных покрытий);
8. После использования ползья пандуса очистить от грязи, протереть влажной ветошью, сложить в упаковку, убрать на место.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575890

Владелец Сидорова Людмила Анатольевна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023